

T-FLEX B

3-Stufen-
Therapie

Modulare Wirbelsäulenorthese
mit therapeutisch korrekter Abschulung
und variablem Auf-/Abbausystem



L1-S1

T-FLEX B

HMV-Nummer
23.14.02.1001

TIGGES innovative Modul-Orthesen)



Patent und
Gebrauchsmusterschutz

T-FLEX B

3-Stufen-
Therapie

mit therapeutisch korrekter Abschulung

1. Stufe: Ruhigstellen in entlordosierender Position

In der ersten Therapiestufe wird eine **Ruhigstellung in entlordosierender Position** im Bereich der Lendenwirbelsäule durch den im Rücken eingesetzten thermoplastisch ver-

formbaren und **in der Höhe verstellbaren** Kunststoffrahmen erzielt, die Rotation ist deutlich eingeschränkt. Durch das verwendete Textilmaterial bleibt der Patient jedoch „**teilaktiv**“.

2. Stufe: Reduktion der Entlordosierung

In der zweiten Therapiestufe werden die starren Metallstäbe des Rahmens gegen **flexible Stäbe** ausgetauscht. Hierdurch wird die Einstellung in Annäherung an die physiologische Lenden-

lordose eingeleitet, der Patient wird durch den Rahmen aber **weiterhin stabilisiert**, die Entlordosierung ist verringert und die physiologische Lordose der LWS annähernd wieder hergestellt.

3. Stufe: Aktivieren

In der 3. Stufe verbleibt dem Patient die bewährte **TIGGES-Bandage** mit **flexibler Gliederpelotte** als langfristige therapeutische Hilfe „im Alltag.“ Das Ziel ist die Wiederherstellung des ursprünglichen Aktivitätslevels des Patienten,

z. B. die volle Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess. Die **zusätzliche Verordnung** einer „Lumbalbandage mit Pelotte“ kann eingespart werden!




1. Therapiestufe



2. Therapiestufe



3. Therapiestufe

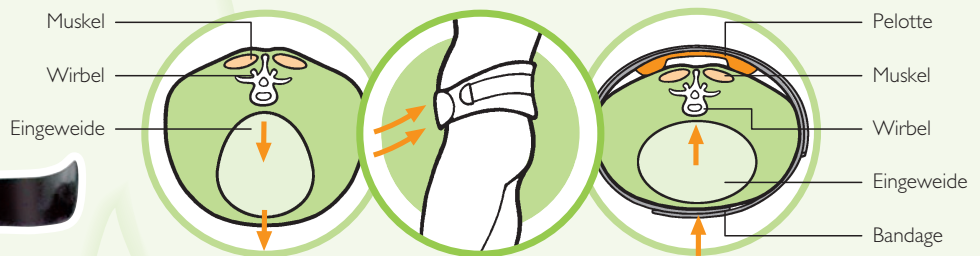

Indikationen

Schwere Lumboischialgie (radikulär/pseudoradikulär) mit Ausfällen bei erheblicher Bandscheibenprotrusion/Prolaps; schweres Facettensyndrom; Spinalkanalstenose (LWS) mit kurzer Gehstrecke; Hyperlordose-Schmerz mit deutlicher Ausprägung; Morbus Scheuermann LWS adult, mit

Beschwerden; Spondylolisthese Grad II; degenerative Spondylolisthese mit leichter Instabilität und Deformität nur in einer Ebene; monosegmentale LWS-

Spondylitis/Spondylodiszitis ohne Deformität; Osteoporose: isolierte LWS-Fraktur ohne Deformität mit Schmerzsymptomatik; Post-OP LWS: Bandscheiben-OP einetägig mit großem Prolaps oder Rezidiv-BS-OP oder Dekompression einetägig ohne Deformität; Trauma: isolierte stabile LWS-Fraktur ohne Hinterkantenbeteiligung; monosegmentaler Tumorbefall/Metastasen (LWS) mit drohender/bestehender Fraktur ohne Deformität.

Rezeptierung: T-FLEX B

mit Auf-/Abbauoption

HMV-Nr. 23.14.02.1001

TIGGES innovative Modul-Orthesen

TIGGES-Zours GmbH
D-45525 Hattingen
Am Beul 10

Telefon 00 49 (0) 23 24-5 94 97-0
Telefax 00 49 (0) 23 24-5 94 97-29
E-Mail tiggess@zours.de
Internet www.t-flex.de



0000/000/0117