

TIGGES-Lumbalorthese

2-Stufen-
Therapie

Modulare Wirbelsäulenorthese
mit therapeutisch korrekter Abschulung
und variablem Auf-/Abbausystem

mit extrem flacher Gliederpelotte

L2-S1

TIGGES-Lumbalorthese

HMV-Nummer
23.14.02.0002

TIGGES innovative Modul-Orthesen



Patent und
Gebrauchsmusterschutz


TIGGES-Lumbalorthese

2-Stufen-
Therapie

mit therapeutisch korrekter Abschulung
und extrem **flacher** Gliederpelotte

1. Stufe: Bewegungseinschränkung in entlordosierender Position

In der ersten Therapiestufe werden eine entlordosierende Position und ein abdominaler Druck durch die **6-gliedrige** Rückenpelotte mit Stabilisierungsstab erzielt. Der **Druck** auf die erkrankte Bandscheibe wird **reduziert**, und die betroffenen **Bewegungssegmente** werden **entlastet**. Die Bewegung ist stark eingeschränkt, Rotationen sind nur noch bedingt möglich.

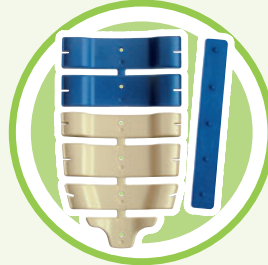


extrem flache
6-gliedrige Rücken-
pelotte mit Stabili-
sierungsstab

2. Stufe: Funktionelle Mobilisierung

In der zweiten Stufe werden die oberen zwei Glieder und der Stabilisierungsstab sowie der obere Gurt abgenommen. Die verbleibende 4-gliedrige Pelotte wird in die Rückentasche der unteren Bandage eingesetzt. Die Wirbelsäule wird hierdurch wieder in die **physiologische Lordose** zurückgeführt. Durch die kompressionsstarke Bandage und die Überbrückung der LWS wird weiterhin eine erhebliche **Entlastung** der geschädigten Bandscheibe erreicht.

Bei erneut auftretenden Beschwerden kann die Bandage jederzeit wieder in die Orthese zurückgebaut werden.

Die **zusätzliche Verordnung** einer – nach der Behandlung mit einer Orthese meist notwendigen – „Lumbalbandage mit Pelotte“ kann bei der **TIGGES-Lumbalorthese eingespart** werden!

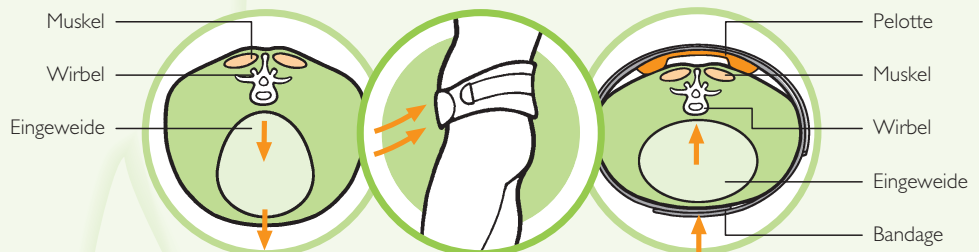

Indikationen

Mittelschwere Lumboischialgie (radikulär/pseudoradikulär) ggf. mit leichten Ausfällen bei Bandscheibenprotrusion/ Prolaps; mittelschweres Facettensyndrom; Spinalkanalstenose (LWS) mit mittlerer Gehstrecke; Hyperlordose-Schmerz mit mittlerer Ausprägung; Spondylolisthese

Grad I mit Lumbalgie oder degenerative Spondylolisthese ohne Instabilität; Osteoporose: statischer LWS-Osteoporose-Schmerz, Lordoseschmerz; Post-OP LWS: Bandscheiben-OP einetägig, kleiner/mittelgroßer Prolaps

**Rezeptierung: TIGGES-Lumbalorthese
mit Abbauoption**

HMV-Nr. 23.14.02.0002

TIGGES innovative Modul-Orthesen

TIGGES-Zours GmbH
D-45525 Hattingen
Am Beul 10

Telefon 00 49 (0) 23 24-5 94 97-0
Telefax 00 49 (0) 23 24-5 94 97-29
E-Mail tiggess@zours.de
Internet www.t-flex.de



0000/000/0117